

IRIGASIN

JUNIOR

ZESTAW
DO PŁUKANIA
NOSA I ZATOK



irygator



12 saszetek

IRIGASIN JUNIOR to wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

IRIGASIN JUNIOR umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

Roztwór izotoniczny

WSKAZANIA:

do oczyszczania jamy nosa w przypadku:

- ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych,
- nieżytu nosa w przebiegu infekcji lub alergii,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa zatok,
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,

do nawilżania błony śluzowej nosa wysuszonej w wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach.

DZIAŁANIE: Roztwór izotoniczny oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, a także pielęgnuje nos i zatoki. Dodatkową zaletą roztworu jest działanie nawilżające na śluzówkę nosa wysuszoną w wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach.

Roztwór hipertoniczny

WSKAZANIA:

- zalecany w przypadku obrzęku nosa towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

DZIAŁANIE: Roztwór hipertoniczny poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania.

Dzieci powyżej 4 do 12 roku życia: Płukać nos i zatoki 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Nie stosować później niż na godzinę przed snem. Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę nie należy się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha oraz nie należy wychodzić na

mróz. Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod kontrolą osoby dorosłej. Wyrób może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Do płukania należy używać wyłącznie butelki dołączonej do opakowania. Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki. Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór. W przypadku napotkania oporu podczas tłoczenia roztworu z butelki zaprzestać używania wyrobu.

Skład: 1 saszetka zawiera 1,08 g chlorku sodu

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli w trakcie irygacji pojawi się uczucie nacisku w uszach, należy przerwać płukanie i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli objawy towarzyszące nieżytowi nosa lub zapaleniu zatok nasilają się lub pojawi się nadwrażliwość, należy skonsultować się z lekarzem. Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu. Wyrób nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie należy stosować butelki jeśli jest uszkodzona, zdeformowana lub zmienita kolor, w takim przypadku należy ją wymienić. Wszelkie niewykorzystane resztki wyrobu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na adres wskazany na stronie www.urpl.gov.pl.

powyżej
4 roku
życia

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | nr serii | | chronić przed wilgocią |
| | termin ważności | | chronić przed źródłem światła |
| | zajrzyj do instrukcji używania | | ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania |
| | niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu | | producent |
| | wyrób medyczny | | |

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZTWORU I WYKONANIA IRYGACJI:

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby nie dopuścić do wprowadzenia roztworu do ucha.




Wsyp do butelki zawartość 1 saszetki dla uzyskania roztworu izotonicznego lub 2 saszetek dla uzyskania roztworu hipertonicznego. Następnie uzupełnij butelkę do zaznaczonej linii (120 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.




Dokładnie zakręć butelkę, zakryj palcem otwór na nakrętce i wstrząśnij do momentu całkowitego rozpuszczenia substancji.



Stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką. Przytóż końcówkę butelki do jednego z otworów nosowych

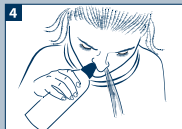

Powoli ściśnij butelkę płynnym ruchem tak, aby roztwór dostał się do nosa. Oddychaj swobodnie, a roztwór wydostanie się drugim otworem nosowym. Nie potykaj roztworu, jeśli dostanie się do gardła. Powtórz czynność dla drugiego otworu nosowego.

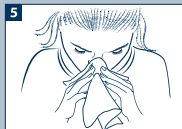

Po płukaniu delikatnie wydmuchaj nos.



Niewykorzystany roztwór wylej, a butelkę i nakrętkę dokładnie umyj i osusz.

PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na chlorek sodu. Catkowiata blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu. Ból, infekcja i uczucie zatkanego ucha.

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.



Wyrób medyczny Irigasini junior jest również dostępny jako zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok zawierający 30 saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok.

DATA WYDANIA INSTRUKCJI UŻYWANIA: 16.12.2025, wersja 1



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

